

P-BAG

P-BAG UNI-SEX – URINAL FÜR MÄNNER UND FRAUEN

P-BAG ist der perfekte Ersatz für Bettpfanne und Urinflasche sowohl im Krankenhaus, Alten- und Pflegeheim als auch bei der häuslichen Pflege.

Beim P-BAG handelt es sich um einen Urinbehälter, der durch die anatomische Form des Trichters sowohl von Frauen als auch von Männern genutzt werden kann und der sich durch seine einfache Handhabung auszeichnet.

Der P-BAG besteht aus einem wiederverwendbaren Trichter, dessen Oberfläche so geschaffen ist, dass Flüssigkeiten leicht abperlen können und einem Beutel mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern.

Der Beutel ist entweder blau (Altenheim / Hauspflege) oder weiss mit einer Skala versehen, die ein Ablesen der Urinmenge in 100ml-Schritten zulässt (Krankenhaus). Ist eine genauere Messung notwendig, kann man leicht den Beutel mit Inhalt wiegen. Das Eigengewicht des P-BAG beträgt 50 g.

Weiterhin ist der Beutel mit einem Einwegventil versehen, das das Zurücklaufen des Urins und die Verbreitung von Gerüchen verhindert. Dadurch entfällt die bei Bettpfannen und Flaschen notwendige Entleerung und Reinigung nach jedem Gebrauch.



Was Bettpfanne und Urinflasche gemeinsam haben:

Seit jeher mussten ältere, behinderte oder bettlägerige Menschen die unterschiedlichsten Arten von Urinbehältnissen nutzen. Frauen werden heutzutage auf der Bettpfanne "platziert", Männern gibt man die Flasche. Beides

- sind offene Behältnisse, die ein hohes Risiko in sich bergen, den Inhalt zu verschütten.
- sind unbequem für den Patienten und hinterlassen einen unangenehmen Geruch.
- müssen gründlichst gereinigt werden, unter anderem weil mehrere Menschen ein und dasselbe "Gerät" verwenden.

Wo kann der P-BAG eingesetzt werden:

- Im Krankenhaus,
- im Alten- und Pflegeheim,
- bei Krankentransporten und Rettungsdiensten,
- bei Ausflügen mit Senioren und/oder Behinderten

... also auch überall dort, wo Bettpfanne und Flasche nur ungern oder gar nicht eingesetzt werden, da das Entleeren und Reinigen nicht sofort möglich ist.

P-BAG

Umwelt und P-BAG

Der P-BAG (Trichter und Beutel) wird aus dem umweltfreundlichen Material Polyethylen (PE) hergestellt und darf bedenkenlos im Hausmüll entsorgt werden. Bei der Verbrennung von P-BAGs entsteht 65 % H₂O (Wasserdampf) und 35 % CO₂ (Kohlendioxid).

Anwendung

Der Griff des Trichters zeigt zum oberen Ende des Beutels.

Frauen platzieren den Trichter mit leichtem Druck so, dass er gut anliegt. Dabei sollte der Griff nach vorne zeigen. Der Beutel sollte nicht abgeknickt sein, damit der Urin frei abfließen kann.

Hinterher sollte darauf geachtet werden, dass der Trichter aufrecht gehalten wird, sodass auch die letzten Tropfen abfließen können.

Der P-BAG kann bis zur nächsten Verwendung leicht am Haltegriff aufgehängt werden.

Vor dem Auseinanderbauen oder dem Entleeren ist es ratsam, über den Trichter etwas Wasser in den Beutel zu füllen um das Einwegventil zu spülen.

Danach kann der Beutel problemlos an der Einkerbung aufgerissen und entleert werden.

Warum sollten Sie die Bettpfanne oder Flasche gegen den P-BAG tauschen?

- Der P-BAG ist sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet.
- Der P-BAG ist mit einem Einwegventil ausgestattet, das das Zurücklaufen des Urins und die Verbreitung der Gerüche verhindert.
- Der P-BAG trägt zur Selbständigkeit und dem Komfort des Patienten bei.
- Der P-BAG verbessert die Arbeitsbedingungen des Personals.
- Der P-BAG kann überall eingesetzt werden, da die Notwendigkeit zum sofortigen Entleeren entfällt. Es besteht nicht die Gefahr, dass der Urin ausläuft oder Gerüche frei werden.

und

- Der P-BAG mindert die Kosten für Pflegeheime, Pflegedienste und für Kliniken und Krankenhäuser.

So können Sie bestellen

P-BAG gibt es in unterschiedlichen Verpackungen:

Einmalige Verwendung: z.B. in Notfallstationen und bei Krankentransporten, wo der Patient nur während kurzer Zeit einen P-BAG verwendet.

Mehrmalige Verwendung: Wenn ein Patient über länger Zeit P-BAGs benutzen muss, kann ein Trichter für mehrere Bags verwendet werden.

Bestellnummer	Inhalt / Karton	<u>Einmal/Mehrmals</u>
10 0005	30 Trichter + 30 Bags	E
10 0006	10 Trichter + 100 Bags	M
10 0007	100 Trichter + 100 Bags	E

Diese Produktinformation wurde Ihnen überreicht von: